

Cellprov ur kindens slemhinna

För tagning av cellprov ur kindens slemhinna kan du beställa teststickor/borstar genom: info@genoscooper.com eller per telefon 044-5747 434.

Kom ihåg att ange hur många djur du ämnar testa. För varje djur behövs minst två teststickor. Ni kan även beställa beställningsblanketter för test i pappersform.

Instruktioner för tagning av cellprov ur kindens slemhinna

Djurets mun bör vara möjligast ren före provtagningen. Ta inte provet just efter att djuret ätit. Inte heller då valpar just diats, då de kan ha hamnat moderns DNA i munhålan. Av varje djur behövs cellprov tagna med **två cellprovsborstar** enligt följande:

1. Öppna förpackningen för cellprovsborstarna så att skaften är mot öppningen. För sedan borstdelen in mellan tandköttet och kinden och **borsta utmed båda kindernas insida cirka 20 gånger**. Färgen på borstdelen kommer inte att förändras eftersom kindcellerna inte går att urskilja med blotta ögat.
2. **Låt borsten lufttorka i minst 15 minuter**. Prov som läggs våta i förpackningen kan förstöras.
3. Lägg borsten tillbaka i förpackningen och fästa förpackningen med tejp.
4. Anteckna **djurets namn och registernummer** på förpackningen. Lägg provet och testets noggrant ifyllda beställningsblankett i vadderat kuvertet.
5. Skicka försändelsen till **Genoscoopers laboratorium** med normala posten. Vid behov håller sig proven i kylskåp några dagar.

Posta försändelsen till:

Genoscooper
PB 162
FI-00381 Helsingfors
FINLAND

Adressen för expressförsändelser:

(TNT, FEDEX, DHL):
Genoscooper
Karvaamokuja 3
FI-00380 Helsingfors
FINLAND